



TRANSWARMER®

COLCHÃO DE TRANSPORTE INFANTIL

com WarmGel®

REF 20421



Uso pretendido: Fornece calor durante o transporte do bebê dentro do hospital ou entre hospitais.

CUIDADO: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.

AVISOS: O não cumprimento destes avisos pode causar queimaduras graves

- Verifique rotineira e regularmente a pele do bebê quanto a vermelhidão e a temperatura interna do bebê
- Não aplique uma fonte de calor adicional ao bebê ao usar este produto • Consulte um médico ao usar este produto em recém-nascidos prematuros ou bebês
- Consulte um médico ao usar este produto em um ambiente sem transporte
- Uso individual somente. Não reutilize ou reaqueça. Descarte após o uso.
- Armazenar em temperatura ambiente

Instruções de uso:

1. Localize o disco de metal e segure-o com o polegar e os indicadores de ambas as mãos.
2. Flexione (dobre) o disco rapidamente até que os cristais comecem a se formar.
3. Pacote de massagem para suavizar e aumentar a taxa de ativação.
4. Depois que a embalagem estiver totalmente ativada, recorte o centro com a palma da mão para formar um pequeno ninho.
5. Coloque o bebê no ninho sobre a superfície do tecido não tecido.
6. Verifique regularmente se há vermelhidão na pele do bebê e monitore a temperatura interna do bebê.

Armazenar em temperatura ambiente

Temperatura quando ativado: 40 °C (a partir de 24 °C de início) 104 °F
(a partir de 75 °F de início).

Conteúdo: Acetato de sódio (grau alimentício), água e espessantes.

Todo o conteúdo não é tóxico; no entanto, se o conteúdo entrar em contato com a pele ou os olhos, lave com água. Não engula.



COLOQUE O BEBÊ DO OUTRO LADO



Não
reuso



Não feito com
látex de borracha
natural



Cuidado



Consulte as instruções
de uso

Fabricado para:

CooperSurgical

95 Unidade Corporativa
Trumbull, CT 06611 EUA

Telefone: (800) 243-2974

Fax: (800) 262-0105

Internacional

Telefone: +1 (203) 601-9818

Fax: +1 (203) 601-4747

Feito nos Estados Unidos

REP da CE

EMERGO EUROPA

Prinsessegracht 20

2514 AP Haia

Os Países Baixos

